

Initial S™: kits stériles à usage unique pour vis canulées à tête Ø4.0 mm

Composition du kit Initial S™

Indications :

Un kit de la gamme INITIAL S™ se compose d'un ensemble d'instruments ou d'un ensemble d'instruments et d'implants (rondelles de compression), utilisables uniquement dans le cadre de la chirurgie orthopédique ou traumatologique, lors de la pose de vis d'ostéosynthèse commercialisées par Newclip Technics.

Les implants de la gamme Stand-Alone Screws sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses osseuses chez l'adulte et l'adolescent, appropriées à la taille du dispositif.

Contre-indications :

- Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
- Grossesse
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Absences de couvertures musculocutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
- Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des vis dans l'os.
- Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l'ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
- Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post-opératoires.
- Etat physique et/ou mental instable.

INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANNULÉES Ø4.0 MM

Réf.	Désignation	Composition	Qté
KIT-SCQ4.0	Kit pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête	Jauge différentielle pour broche Ø1.3 mm	1
		2 en 1 : Tournevis hexagonal 2.5 mm – Fraise Ø6.0 mm	1
		Foret Ø2.9 mm - canulé Ø1.4 mm - L 120 mm - Encliquetage rapide AO Ø4.5 mm	1
		Manche à usage unique 5.8 mm	1
		Broche Ø1.3 L 140 mm	3
		Rondelle de compression	2


KIT D'ABLATION

Réf.	Désignation	Composition	Qté
KIT-REMOVE-A	Kit d'ablation pour 6 pans 2.5 mm	2-en-1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm - Fraise Ø3.5 mm	1

VIS COMPRESSIVES AUTOFORANTES Ø4.0 MM*


Réf.	Désignation
H1.4QT4.0L26-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 26 mm - STERILE
H1.4QT4.0L28-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 28 mm - STERILE
H1.4QT4.0L30-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 30 mm - STERILE
H1.4QT4.0L32-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 32 mm - STERILE
H1.4QT4.0L34-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 34 mm - STERILE
H1.4QT4.0L36-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 36 mm - STERILE
H1.4QT4.0L38-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 38 mm - STERILE
H1.4QT4.0L40-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 40 mm - STERILE
H1.4QT4.0L42-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 42 mm - STERILE
H1.4QT4.0L44-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 44 mm - STERILE
H1.4QT4.0L46-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 46 mm - STERILE
H1.4QT4.0L48-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 48 mm - STERILE
H1.4QT4.0L50-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 50 mm - STERILE
H1.4QT4.0L55-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 55 mm - STERILE
H1.4QT4.0L60-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 60 mm - STERILE
H1.4QT4.0L65-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 65 mm - STERILE
H1.4QT4.0L70-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L 70 mm - STERILE

* Vis disponibles séparément en version stérile.

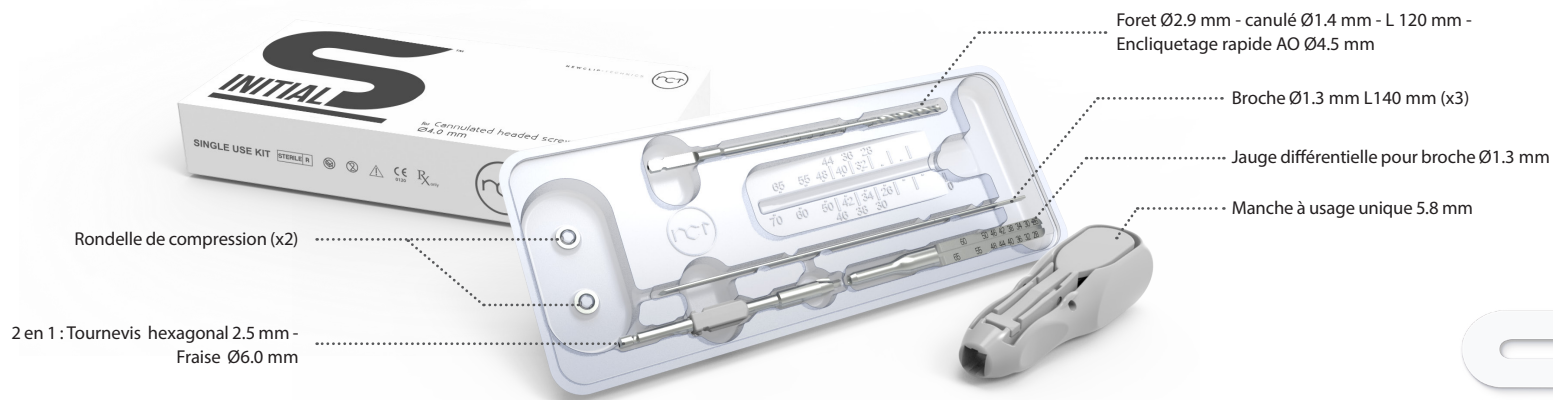


Initial S™ : kits stériles à usage unique pour vis canulées à tête Ø4.0 mm

Technique chirurgicale

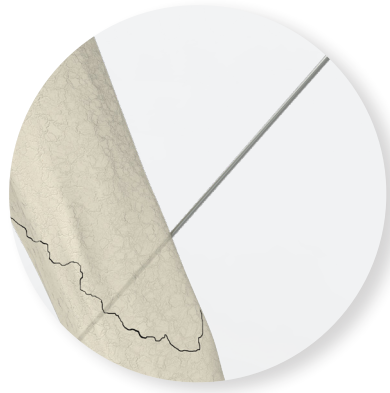


1. Insérer une broche Ø1.3 mm afin de stabiliser les deux fragments.

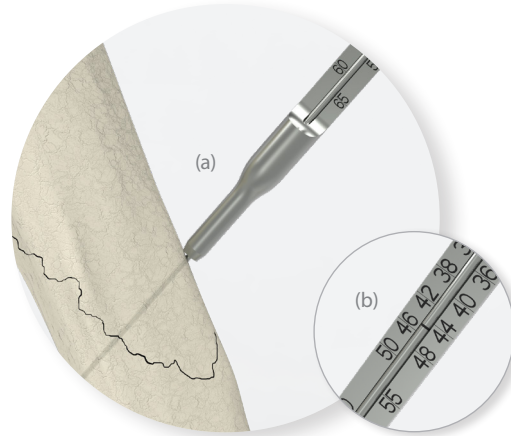


2. Insérer la jauge différentielle le long de la broche Ø1.3 mm jusqu'à atteindre la première corticale (a). Déterminer la profondeur d'insertion en utilisant le marquage de la broche (b).

NB : La broche peut ensuite être insérée plus profondément afin de prévenir un éventuel retrait lors du perçage.

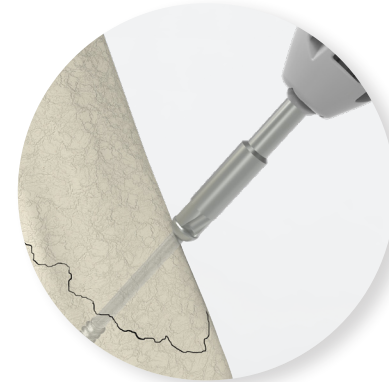

3. Sélectionner la longueur de vis appropriée et insérer la vis le long de la broche en utilisant la partie tournevis du 2-en-1 jusqu'à ce que la compression et la réduction désirées soient atteintes. Retirer la broche.

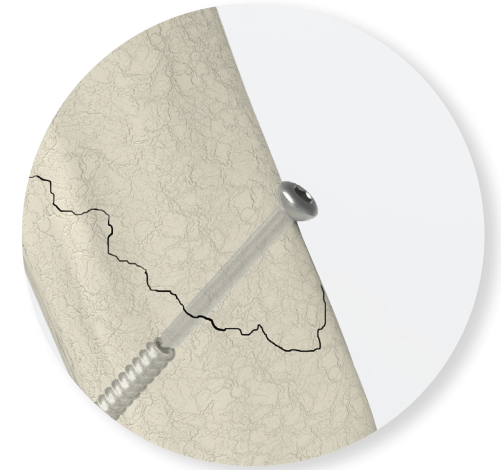


RÉSULTAT FINAL

Étapes optionnelles :

Ces étapes peuvent être réalisées avant vissage.

- 1- En cas de densité osseuse trop importante ou de traversée de plusieurs couches de corticales, il est recommandé de forer avant l'insertion de la vis. La profondeur de perçage peut être lue directement sur le foret.
- 2- Si nécessaire fraiser en utilisant la partie fraise de l'ancillaire 2-en-1.

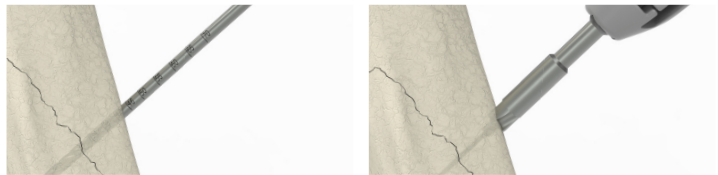

Rondelle de compression



NB : en cas d'os ostéoporotique, une rondelle de compression peut être ajoutée en-dessous de la tête de vis avant l'étape 3 afin d'optimiser la compression.



L'instrument 2-en-1 est compatible pour une utilisation à la main et au moteur. Il est recommandé de finaliser le vissage à la main. Appuyer sur le bouton (c) pour libérer l'instrument du manche.



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin
45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine , France
P: +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax: +33 (0)2 40 63 68 37
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS USA
Newclip USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
P: + 1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS GERMANY
Newclip GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland
P: +49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA
Newclip Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australie
P: +61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS JAPAN
Newclip Technics Japan K.K.
KKK Bldg 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taïto-Ku, Tokyo, 111-0053 Japan
P: +81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.fr

Les informations données sont destinées à présenter les produits Newclip Technics. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice avant utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.